


KURZANLEITUNG

Blutzucker messen mit dem
FreeStyle Lite Blutzucker-Messsystem

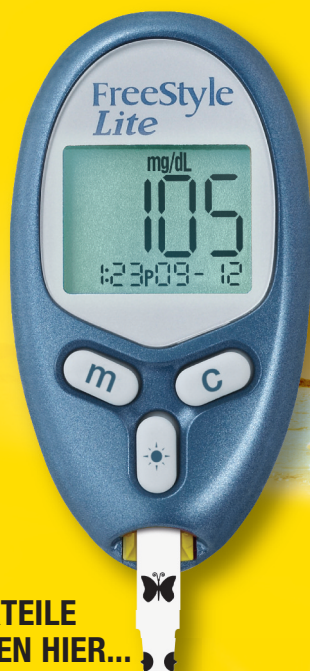

DIE VORTEILE
BEGINNEN HIER...



NEU  **FreeStyle
Lite**
Blutzucker-Teststreifen


DEN UNTERSCHIED ERLEBEN

 **Abbott**
A Promise for Life


3 einfache Schritte zum sicheren Messergebnis

1 Teststreifen einführen

- Teststreifen in Messgerät einführen

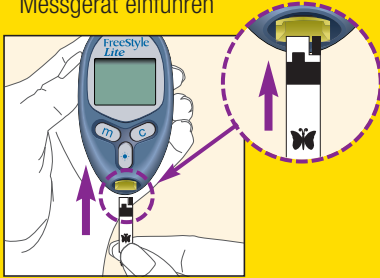

- Das Gerät schaltet sich automatisch ein


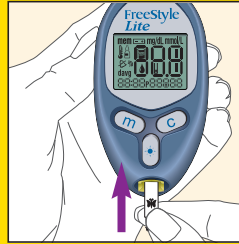


- Symbole für Blut und Teststreifen blinken



2 Blutauftrag auf den Teststreifen

- Mit den „ZipWiks“ die Blutprobe einfach kurz berühren. Blut wird automatisch eingezogen.

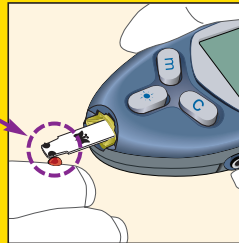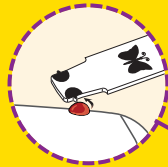


► ◀


Neu! Einzigartige ZipWick „Nasen“ für einfacheren Blutauftrag und schnelleren Bluteinzug.

3 Messtart / Ergebnis

- Signalton ertönt (1x)
Die Messung startet
- Kurze Linie bewegt sich im Uhrzeigersinn

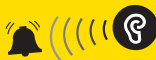

- Signalton ertönt (2x)
Messung beendet
- Display zeigt Messergebnis an

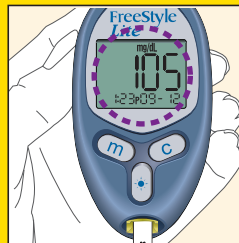

Hinweis:

Wenn Messung nicht startet, kann innerhalb von 60 Sek. Blut auf den selben Probereich nachgetragen werden.

Informationen unter:
www.efficient-check.de